

**solabond®**

به مدت تقریبی ۱۵ ثانیه با هوای فشرده بدون رونگ با وقت خشک کنید. پیش از استفاده از روکش دوم، روکش سولاباند را به مدت ۲۰ ثانیه با لامپ دندان درمان کنید.

**احتیاط:** سولایاند را تریزید. اگر سولایاند بالا فاصله استفاده نمی شود، آن را در نور ملامیم نگه دارید تا از بهبود زودرس آن جلوگیری کنید.

**۱۶- استفاده از لایه دوم سولوپاند**  
با استفاده از قلم، لایه دوم سولوپاند را روی سطح پمایلید و به مدت تقریباً ۳۰ ثانیه آن را به شدت برانش کنید. سپس به مدت تقریباً ۱۵ ثانیه با هوای فشرده دوند و سپس هوا را خشک کنید. هر دو لایه را به مدت ۲- ۳ ثانیه با لاب دندان کبیر کنید. سپس می توان پر کنده کامپوزیت لات کربون فرار از داد.

۱.۷. قرار دادن، درمان کردن و پایان دادن به پرسکردن  
در مسیر تور عملیاتی های کامپوزیت نحوه قرار دادن، کیبور و تکمیل کار پر کردن با کامپوزیت، شرح داده شده است.

### ۲. پر کردن ریشه دندان ها

لازم است که دننان ها یا یک مرد جاذب‌سازی کنند. دننان ها را با محلول پراکسید هیدروژن<sup>(۲)</sup> (۳) با محلول هیپوکلریت سدیم تمیز کنند. هنگام رغایر دادن بسته های آندوندوتیک منعلی را بر شرطی ای با کامپوزیت های یوتیکینگ، به ستوت‌العمل های سازنده راماجه‌گیر کنید. کاتالال را برای تعیین طول سوت رشته نمود و بایار آمده کنید. بسته را روی کوکی در چند دقیقه و در سورت لزوم طول آن را کاکل هدید. و بسته را برداشتند.

**۲.۲ پرماینگ کاتالیزه ریشه**  
از اینجا که بر این نیت توان به سطح کاتالیزه رسید، سولانید پاید با سرنگ داخل کاتالیزه می شود تا در چهار مرحله جداگانه، ۶ تانیه شستشو شوند. امیمان کنید که تمام رطوبت پایان شده به طور مداوم خیس شده اند. هر جا که ممکن است، از برس برای وارد کردن سولانید و افزایش خسرو اسقاطه کنید. سولانید اضافی را از کاتالیزه شستشو شوید تا از اسقاطه ای که قله کاغذ نرم خسک و هاوی شوده ری بین رونخ پنهان شود. مدت ۱۵ تانیه با دقت پاک و خشک کنید. سولانید را با دامن کنکر می سوید.

**۲.۲.۱. استفاده از کامپیویت لوتینگ**  
کامپیویت لوتینگ را همانطور که در دستورالعمل های سازنده آن شرح داده شده

**۳. استفاده های خاص از سولاباند**  
استفاده از سولاباند بر روی فلزات گرانبها / غیر گرانبها و پرسلن برای ترمیم تاج و  
— پایه —

**۳.۱. تهیه سطوح ترمیم**  
در صورت نزوم، سطح فلز یا پرسلن شکسته شده را با ایزار الایاس (۴۰ میلی متر) زیر کرید، علاوه بر این (a) سندبلستر است. آنها را با مقدار زیادی آب بشوید و با هوا فشرده خشک کنید.

**هشدار:** اجازه ندهید که زل اچ با مخاطر، چشم یا پوست در تماس بگیرد. در صورت برروز این اتفاق، بالافاصله با مقادیر زیادی آب، محل را بشویید.

۲۲- استفاده از سلول‌اباند

سلول‌اباند را با دقت روی سطح فلز، پرواش کنید و آن را به مدت ۱۵ ثانیه با هواش فشرده شک و بدون رونر، خشک کنید. رویه را به مدت ۲۰ ثانیه با یک لامپ کیوئر نداند، درمان کنند. ترمیم را شروع کنید.

سولوپاند یک سیستم پالیندیگ است که مخلوط دیگری نیز ندارد. پالیندیگ در کم موله اجام می شود. سولوپاند برای انتقال کامپوزیت ها و ساخت محکم مینا و عاج و همچنین فلاتز غیر کاربینا برای ساخته ساده است. همچنین برای اشباع کالا های روشی پیش بر کدن می شود. سولوپاند یا سیمان کردن پیست های روشی متفعل با رشته ای استفاده می شود. سولوپاند همچنین می تواند به عنوان آغازگر ترمیم چسبی غیر مستقیم، به عنوان مثال porcelain و اپلی کامپوزیت، انانی، روکش های لمبینت، عاج و سرامیک را در صورت خربی که به صورت سیمپلیکسیابی با وجود آنده و با سیمان دوال کشور استفاده کرد. استحکام پیوند زیاد نسبت سولوپاند و مینا عاج بر اساس همان اصول عمل می کند. این امور می باشد. استحکام تکریلیک اسید کربوکسیلیک، استحکام پیوندی بالا و سازگاری زیستی طولانی مدت را فراهم می کند. در صورت خربی با ارزی برای تناکترین این ماده استفاده نمکی. سولوپاند با تمام مارک های کامپوزیت های لایت کیور سازگاری می باشد. این که سولوپاند بتنی بر اتالون و Wet Bonding آب دوست می باشد. می توان آن را با سطح علاوه روی مولف علاوه با سلف کمی مطروب هستند. قرار داد. در مواردی که سیستم چسباندن و پالیندیگ با سلف کیور و با دوال کیور اجام می شود. سولوپاند را می توان با استفاده از مخلوط solobond activator و solobond activator و با پریکر. صورت جداله در دسترس است. این که کار ها در دستور العمل های solobond activator و solobond activator و شرک داده شده است.

۱. استفاده از solabond برای پر کردن مواد آماده سازی برای استفاده از مواد کامپوزیت کیبور و مواد پرکننده ی کامپوزیت ایزوله کردن

۱.۲ آماده سازی حفره

پیش از شروع آماده سازی، دندان را با سمبلاد و آب تمیز کنید. جهت اطمینان از اینکه ساختار سالم دندان تا حد ممکن آسیب نیند، دندان را با حالتی مینیمال حداقل آماده کنید. حاشیه خفره مینا باید به صورت اربی توراش داده شوند (۵).  
ملل مت) تا سطح حسیب در مینا زنگ شود و مقاومت باشد گرفتار نباشد.

**۱.۳. محافظت از پالپ**  
در حفره های بسیار عمیق، مناطقی که در نزدیکی پالپ هستند باید با یک لایه **liner** حفظ هیدروکسید کلسیم پوشانده شوند.

## ۱۴- اجنبی میستانی دندان

**هشدار:** اجزاء ندیده ۷ لج جا ماختار، چشم یا پوست در تماش قرار گیرد. در صورت بروز این اتفاق، بلا فاصله محل را با مقابله بازدید آب بشویید. گرچه معمولاً برای اچ کاری میان دندان برای کاربردهای معمولی کامپوزیت ضروری نیست، اچ کاری میانی دندان مقاومت پیوند را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

**۱.۵ استفاده از سولاباند**  
پیش از استفاده سولاباند را تکان دهید. با استفاده از قلم مقدار زیادی از سولاباند را به عاج و مینای دندان بمالید و به مدت ۳۰ ثانیه آن را به شدت برداش کنید. سپس

## شرایط نگهداری

در دمای ۱۰° الی ۲۵° درجه ی سانتی گراد (۵۰° الی ۷۷° درجه فارنهایت) نگهداری کنید.

## داده های فنی

زمان کیور (پلیمریازیون سیک) با لامپ دندانپزشکی: از سیستم پلیمریازیون سیک با دامنه انتشار ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر به مدت ۲۰-۲۵ ثانیه برای پلیمریازیون مواد، استفاده کنید. خصوصیات فیزیکی مواد نیاز تها در صورت عملکرد صحیح نور پلیمریازیون حاصل می شود. بنابراین، لازم است شدت نور را طبق دستورالعمل سازنده به طور منظم بررسی کنید. زمان کیور برای کیور شیمیایی ۳ دقیقه است. (نسبت اختلاط: ۱ سولاباند و قعال کننده بدون نور و با حذف هو)

## اترات جانبی

با استفاده مناسب از این دستگاه پرژک، عوارض جانبی ناخواسته بسیار نادر است. و اکتشاف سیستم ایمنی بدین (آلرژی) یا ناراحتی موضعی را نمی نوان به طور کامل رد کرد. اگر لازم بود در مورد عوارض جانبی ناخواسته اطلاعاتی کسب کنید - حتی اگر شک داشته باشید که این اثر جانبی توسط محصول ما ایجاد شده است - لطفاً با ما تماس بگیرید.

## موارد منع مصرف / فعل و اتفاعات

اگر بیمار حساسیت بیش از حد به یکی از اجزای این محصول را نشان داد ، توصیه می کنیم از آن استفاده نکنید و یا این کار را فقط تحت نظرات دقیق پرژک انجام دهید. دندانپزشک باید بپشن از استفاده از محصول، فعل و اتفاعات شناخته شده و واکنش متقابل محصول را با سایر مواد موجود در دهان بیمار در نظر بگیرد.

## توجه داشته باشید

لطفاً در صورت استفاده از این دستگاه پرژکی برای تولید مدل خاص، اطلاعات فوق را به دندانپزشک ارائه دهید. لطفاً برگه های اطلاعات ایمنی را نیز مطالعه کنید.



TRENT DENT PRODUCTS LIMITED  
UNIT 3C, 88 PETERBOROUGH ROAD  
LONDON SW6 3HH, UNITED KINGDOM

[EC REP]

EU REPRESENTATIVE TRENT DENT  
DENMARK, AUTOMATIKVEJ 1,3. &  
4.SAL COPENHAGEN 2860, DENMARK