

زمان و اکتشن توصیه شده:

30 sec	مینای دندان طبیعی
20-30 sec	مینای دندان نارس
90-120 sec	دندان های فلوریده، دندان های شیری
15 sec	عاج

اقدامات احتیاطی / هشدارها:

سولاج حاوی اسید ارتو-فسفریک (۳۷٪) می باشد. منجر به سوختگی شدید پوست و اسیدی بر چشم می گردد.

اگر روی پوست (با) رخخت: لباس های آلوهه را بالا قابله در بیاورید. پوست را با آب / دوش بشوپید. اگر در تماس با چشم قرار گرفته: برای مدت حدود دقیقه با اختطاب با آب شوپید. در صورت وجود آنرا ها را خارج کنید. هنگام استفاده ادامه دهد. هنگام شست و شوپ لباسهای با کد دکتر تماس بگیرید. هنگام استفاده از این محصول از لباس محافظه، دستکش و عینک / ماسک صورت مناسب در قرار گیرد.

هرگز اجازه ندهید که این مواد بال لب، خود دندان یا دندان های مجاور در تماس باشند.

لطفاً توجه داشته باشید:

اگر از روش Selective-etch استفاده نشده است، قسمت هایی که قرار است روی آن ها کار شود را با متناسب عایق بندی کنید. برای حفظ بدهاشت، استفاده از قالم جدید برای هر فرد مخصوص است. پس از استفاده، برای جلوگیری از تمدن شدن سولاج، نوک تزریق را جدا کرده و پیسنتون سرنگ را کمی جمع کنید (به سمت عقب بکشید). درت سرنگ را پس از استفاده محکم بندید. جهت جلوگیری از خشک شدن سولاج، سرنگ را در درجه ۱۰ - ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. پس از تاریخ افضل استفاده بکنید. محصول فقط برای استفاده دندانپزشکان می باشد.

فعل و افعالات با مواد دیگر:

از آنجا که اج ممکن است liner های فوجه ای (مانند هیدروکسید کلسیم) را اج کنند، فقط از مواد مغایر در برابر اسید استفاده کنید.

عارض جانبی:

با استفاده صحیح از این دستگاه پژوهشکی، عوارض جانبی ناخواسته سیار نادر است. و اکتشن های سیستم ایمنی (ازرس) با راحترین وضعی را نمی توان به کامل در کرد. اگر در رابطه با عکس العمل های ناخواسته نیاز به کسب اطلاعات داشتید - حتی اگر مطمئن نیستید که اثر جانبی توسط محصول مایجاد شده است - لطفاً با ما تماس بگیرید.

مواد دهن منع مصرف / فعل و افعالات:

اگر بیمار نسبت به یکی از اجرای این محصولات ارزی با حساسیت پیش از حد داشته است، توصیه می کنیم از این استفاده تکنید. با این کار را فقط نظر نظارت درخواست نامن خواهیم کرد. دندانپزشک بین از استفاده از محصول، باید و اکتشن مقاطعه و واکنش های متنقابل مخصوص را با سایر مواد موجود در دهان، در نظر بگیرد.

توجه داشته باشید:

لطفاً برگ های اطلاعات ایمنی را نیز مطالعه کنید.

محتویات بسته:
سرنگ ۲ میلی لیتری

تصویر / مخلفات در برایر آلوگی متقابل

سرنگ را با نوک تزریق متنصل شده در یک درب مانع با شکل مناسب قرار دهید. سوراخ انتیا در ربا کانول سوزار چک شود، کالول را برای استفاده قرار دهید. استفاده از درب مانع باعث تمیز مانند و ضد عفونی سرنگ می شود. پس از استفاده، درب سرنگ را مستبد و درب و نوک تزریق را با گرفت قسمت مرکزی نوک تزریق را سطح زبانه مناسب دور بزیند. در پوشش نگاهداری سوزار چک را تعوفی کنید.

ضد عفونی کردن - پس از براحتی نوک و نوک تزریق، این مخصوص را با استفاده از یک ضد عفونی کنند که کنده سطح منعطف (تماس مایل) که توسط مراکز کنترل عفونی کنید. توصیه شده و سوت اجمون دندانپزشکی امریکا نایاب شده است. ضد عفونی کنید. رهایی های تکنلوفون غوتون در موقیت های پیدا شده از دندانپزشکی RR-۱۷۸ - ۴۵۲ شماره ۳-۰۰۰ جلسنگ مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها

انتقال مواد از یک کار تریج ذخیره سازی به یک سرنگ کاربردی خالی کوچکتر

در پوشش اب بدین شکل که از کار تریج ذخیره را باز کنید و آن را یک آدانبور جایگزین کنید. سرنگ خالی ابلیکیشن را به سمت مخالف آدانبور بچرخانید. از مهر و موم مناسب اطمینان حاصل کنید. با کشیدن پیشگویون به ارامی و ثابت سرنگ را کنید. با دست دیگر، به طور هم‌مانند پیشگویون کار تریج ذخیره سازی را فراشند. درین دهد نایاب انتقال شبیه شنیدن کنید. سرنگ را بیش از اندازه بگیرید.

亨گام انتقال مواد، سرنگ را بست اضافه گرفته شود. در لایل پهلوانی، هیچ ماده ای را از سرنگ به کار تریج ذخیره وارد نکنید. پس از وصل کردن نوک تزریق به سرنگ، سرنگ اماده استفاده است. برای اطمینان از تمدن شدن صحیح کار اعداد لات و تاریخ اتفاق را روی سرنگ بنویسید.

لطفاً توجه داشته باشید: سرنگ تزریق ممکن است چندین بار برای بیماران استفاده گردد. اما باید فقط یک بار برای این اتفاق بگیرید.

تکنیک Selective-etch:

سولاج را کاملاً دقیق روی حاشیه مینای دندان بزنید و ۳۰ ثانیه صبر کنید تا تانیزی را بگذارد. سپس هر سطح مآمده شده را به مدت حداقل ۵ ثانیه با مقابله زیادی اب بشوپید و سطح اج شده را با هوا فشرده بدون رونخ خشک کنید. پس از اج، سطح مینای دندان را برگ سفید گچی به نظر رسد. اگر اینکوئه نیست، قوهار اج کنید. قبل از استفاده از سولاج، نایابی این باره بازی ایام و این را مجدداً اج کنید. آلوهه گردد. اگر مینای دندان شده به براز آلود شد، آن را مجدداً اج کنید (نقریباً ۱۰ ثانیه). دقت کنید که سطح دندان را برگ سفید گچی در بیانی دندان

تکنیک Total-etch:

با مخصوص و لات اندینگ عاج و مینای دندان: اج را به سطح خفره ی مینای دندان پمایل و ۱۵ ثانیه صبر کنید. سپس، خفره را کاملاً با زل اج بر کنید و ۱۵ ثانیه دیگر جهت اثر گذاری صبر کنید. زل اج را توسعه ساکنی با کنید سبته به انداره خفره، هر سطح را به مدت حداقل ۵ ثانیه با مقابله زیاد آب و با دقت بشوپید. مناطق اج شده را با هوا فشرده بدون رونخ خشک کنید. باندینگ و کامپوزیت را همان گونه که در دستورالعمل های سازنده شرح داده شده استفاده کنید.

مشکل	دلیل	درمان
مواد خشک شده، غلظیت شده است.	در ب سرگ بار گذاشته شده است.	در ب سرگ باز از هر بار استفاده محکم پنید.
خرمیم منصل نمی ماند.	خرمیرهای پولیش کننده خرمیرهای روغنی ممکن است ترکیبی ایجاد کند که مانع روند آج شود.	از خرمیرهای پولیش کننده دارای روغن استفاده نکنید.
براشن کردن زل آج، خطأ آج پیش از حد	زل آج را برash نکنید، فقط آن را به سطوح بمالید.	زل آج را برash نکنید، فقط آن را به سطوح بمالید.
دندان به مقدار ناکافی یا های آلوهه خشک شدن.	زل به طور غیرمستقیم شست و شواده می شود، باقی مانده اسید می تواند نایل منفی روی پلیمربراسون داشته باشد.	هر سطح آماده سازی را حداقل ۵ ثانیه بشویید.
الودگی با برق	دوباره برای ۱۰ ثانیه آج کنید.	فقط از هوای فشرده بدون روغن استفاده کنید.



TRENT DENT PRODUCTS LIMITED
UNIT 3C, 88 PETERBOROUGH ROAD
LONDON SW6 3HH, UNITED KINGDOM

[EC REP]

EU REPRESENTATIVE TRENT DENT
DENMARK, AUTOMATIKVEJ 1,3. &
4.SAL COPENHAGEN 2860, DENMARK